

# Allgemeine Hinweise zur Einsendung von Probenmaterial für immunologische Untersuchungen

## Allgemeines

Einsendung von Probenmaterial ausschließlich nach **elektronischer Anforderung über Lauris**

## Verpackung der Proben

Primärproben in kleine Transporttüten verpacken und in schwarze (!)\* Versandtüten geben.

\*Schutz der persönlichen Angaben zum Patienten

## Serologische Antikörpernachweise

Eine Serummonovette ( > 2 ml) ist in der Regel für alle Antikörpernachweise ausreichend. Lagerung bei 4°C.

**Hinweis:** Bei zu kleinen Volumina können evtl. nicht alle Tests durchgeführt werden.

## Lymphozytendifferentialanalyse

Frisches EDTA-Blut (2,7 ml) muss **am Abnahmetag** im Labor eintreffen (Transport/Lagerung bei Raumtemperatur).

**Hinweis:** Lagerung von Seren bzw. EDTA-Blut bei falscher Temperatur kann die Testergebnisse negativ beeinflussen.

**Öffnungszeiten: Mo. – Fr. von 09:00 h bis 17:00 h**

Auskunft, Lob oder Beschwerde:

Tel: 0931/201-49969 oder 201-49169

Mail: [virusdiagnostik-qmb@uni-wuerzburg.de](mailto:virusdiagnostik-qmb@uni-wuerzburg.de)